

SurErec-Spannungsring

SurErec-Spannungsring mit Vakuumtherapiesystem Osbon ErecAid™ erfolgreich anwenden

Der SurErec-Ring ist in vier verschiedenen Grössen erhältlich:

- 4 = 16 mm Lochdurchmesser
- 5 = 17 mm
- 6 = 18 mm
- 7 = 19 mm


Die Ringnummer ist am Ringrand aussen lesbar.

Welcher Ring für Sie der Richtige ist, werden Sie mit ein paar Tests herausfinden. Beginnen Sie dabei immer mit dem grössten Ring (Grösse 7). Wenn dieser eine zufriedenstellende Erektion erzeugt, empfehlen wir Ihnen bei dieser Grösse zu bleiben, ansonsten mit der nächstkleineren Grösse weiter testen. Es ist wichtig die Erektion immer mit dem kleinstmöglichen Druck aufzubauen, es sollte kein "abschnüren" sein.

Anwendung

1. Ring auf Zylinder stecken

Der Ring wird, mit der glatten Oberfläche gegen aussen gerichtet, auf den Zylinder aufgezogen. Wichtig ist, dass die beiden Schwellkörper-Presspunkte in Richtung Bauchnabel zeigen.

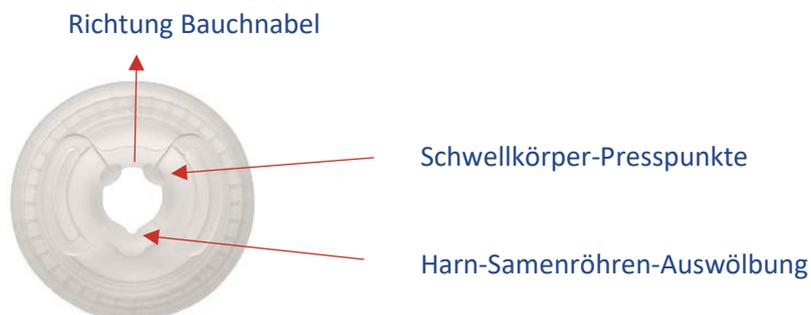

2. Penis und Ring mit Lubricant Personal Gel eincremen

Den Durchgang des Ringes sowie den Penis inkl. Eichel ausreichend mit Lubricant eincremen.

3. Zylinder und Vakuumpumpe zusammenstecken und Penis platzieren

Wenn der SurErec-Ring richtig platziert ist, können Sie auf der Oberseite des Zylinders eine Aufschrift erkennen. Platzieren Sie den Penis direkt vor dem Eingang des Zylinders.

4. Vakuum im Zylinder erzeugen

Jetzt beginnen Sie zu pumpen, so dass der Penis ohne Druck durch den Ring in den Zylinder gleiten kann. Zwischen den einzelnen Pumpstößen muss eine Wartezeit von 10 – 25 Sekunden eingehalten werden, so dass ein optimaler Blutfluss im Schwellkörper gewährt werden kann. Um eine optimale Erektion zu erreichen, können Sie zwischen den Pumpstößen das Vakuum durch drücken des grünen Knopfes ein kleinwenig reduzieren und danach wieder pumpen. Nun pumpen Sie solange, bis die gewünschte Erektion erreicht wird. Durch ein wenig Übung werden Sie schnell erkennen, welches die richtige Erektion für Sie ist. Ein zu "harter" Penis beeinträchtigt den Geschlechtsverkehr. (Weniger Gefühl, allfälliger Überdruck usw.).

5. Zylinder vom Ring nehmen

Sobald die gewünschte Erektion erreicht ist (normalerweise hebt sich der Penis vom Zylinderboden ab), können Sie wiederum den grünen Knopf drücken und den Zylinder entfernen. Eventuell die Scheide der Frau ebenfalls mit Lubricant Personal Gel eincremen.

6. Nach dem Geschlechtsverkehr, oder spätestens nach 30 Minuten, ist der Ring vom Penis abzuziehen

Nach dem Geschlechtsverkehr wird wiederum der Penis mit Lubricant eingecremt, um den Ring einfacher abzuziehen. Ziehen Sie den Ring mit Hilfe der Ringohren auseinander, so dass der Penis ein wenig erschlaffen kann, danach vorsichtig abziehen.

Es ist wichtig bis zum nächsten Geschlechtsverkehr eine Erholungszeit von mindestens 60 min. einzuhalten.

7. Reinigung

Den Ring bitte nur mit Warmwasser und flüssiger Seife reinigen.