


# VenoSeal™

## Hilfe bei venösem Leck

Venöses Leck bedeutet für einen Mann, dass die Venen im Penis das Blut während einer Erektion nicht lange genug halten können und ein sogenannter venöser Rückfluss stattfindet, meist während des Geschlechtsverkehrs (Aktivität). Die Entstehung der Erektion ist somit kein Problem, nur deren Aufrechterhalten. VenoSeal™ unterstützt Sie dabei.

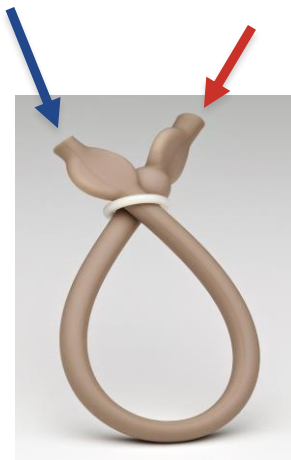

### Alle Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Handhabung
- Hoher Tragekomfort durch weiches und angenehmes Material
- sehr diskret durch seine Färbung
- Unterstützend zu PDE-5 Medikamenten
- Wiederverwendbar (kein Einwegprodukt)

### Kurzanleitung auf einen Blick:

- Schlinge an Peniswurzel platzieren (vor oder während Erektionsentstehung)
- Ende mit Ballrundung (**roter Pfeil**) sollte nach oben zeigen
- Ende ohne Ballrundung (**blauer Pfeil**) mit Daumen und Zeigefinger festhalten
- Horizontal von Ballrundung wegziehen bis Ring festsitzt
- Nur so fest anziehen, bis der Blutrückfluss gestoppt wird (Minimal-Druck)
- Nach 30 Minuten sollte der Ring gelöst werden, indem am Ende mit Ballrundung gezogen wird und sich dadurch die Schlinge weitet

### Wichtige Hinweise:

- VenoSeal™ soll nicht den Besuch bei Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin ersetzen!
- Erektionsstörungen können ein Hinweis auf verschiedene Erkrankungen sein