



HaemoCer™ PLUS - Kit endoscopique

Poudre hémostatique à base végétale

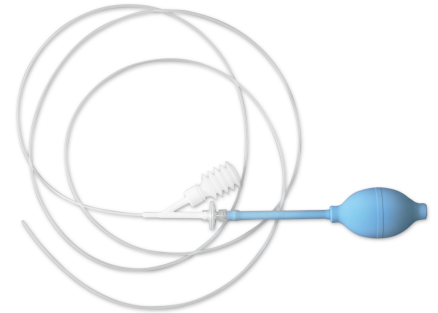

HaemoCer™ PLUS est un agent hémostatique innovant en poudre à base végétale destiné à soutenir l'hémostase dans le cadre d'interventions chirurgicales. Du fait de son énorme capacité d'absorption d'eau, le matériel complètement résorbable accélère la cascade de coagulation naturelle ; l'hémostase s'effectue immédiatement au contact du sang.

L'applicateur endoscopique HaemoCer™ est destiné à l'application de la poudre HaemoCer™ PLUS en cas de saignements dans le tractus gastro-intestinal supérieur et inférieur. Le tuyau d'application est introduit à travers le canal de l'endoscope et positionné sur le saignement. Le débit d'air comprimé généré par la pompe manuelle transporte la poudre directement vers le site de saignement.

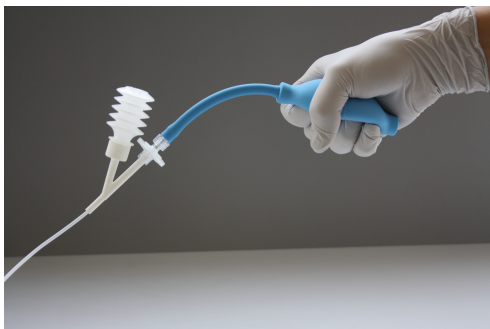

- Pompe manuelle comme source pneumatique
- Dispositif manuel flexible à usage unique
- **À 100 % sans** constituants d'origine animale ou humaine
- **Immédiatement prêt à l'emploi** sans préparation complexe comme la décongélation ou le mélange p. ex.
- Cet applicateur ne nécessite **aucun dispositif de manipulation** (compresseur d'air, source de gaz à haute pression etc.)
- HaemoCer™ PLUS **est complètement résorbé dans le corps au bout de quelques jours** par l'activité d'amylyase

| N° d'article | Description | Contenu par emballage |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| HFP203 | HaemoCer Plus, poudre hémostatique, 3 g | 1 unité |
| HFS323 | HaemoCer Plus, kit endoscopique avec 3 g de poudre | 1 unité |